

MÜŞTERİ İLETİŞİMİ

Tüm AU ve DxC 700 AU Klinik Kimya Analizörleri
Apolipoprotein B REF OSR6143 ve Apolipoprotein Kalibratörü REF ODR3022

Kasım 2019

Değerli Beckman Coulter AU ve DxC AU Müşterisi,

Beckman Coulter, Apolipoprotein (Apo) B REF OSR6143, lot numarası **2612 ve üstünde**, hasta örnek sonuçlarında, kalite kontrol sonuçlarında ve Harici Kalite Güvence şeması sonuçlarında fark edeceğiniz bir değişiklikle ilgili bilgilendirme yapmak istemektedir.

Laboratuvarınızda kullanılmakta olan Apolipoprotein B reaktif/kalibratör lotu kombinasyonuna bağlı olarak, değişiklikler aşağıdaki tabloda özetlendiği gibi farklılık gösterebilir.

Apolipoprotein B	REF	Lot Numarası	Ortalama Hasta Örneği Değişikliği	Ortalama Kalite Kontrol Değişikliği
Reaktif	OSR6143	2612 ve üstü	+%13'e kadar	+%16'ya kadar
Kalibratör	ODR3022	2300, 2301, 2303 ila 230x		

Beckman Coulter, hasta örnek geri kazanımlarınızı yeniden değerlendirmenizi ve kalite kontrol hedefleriniz ile aralıklarınızı yeniden belirlemenizi önerir.

Bu süreçte Beckman Coulter'ın ürünü, Apo B, SP3-08 için WHO-IFCC Uluslararası referans materyaline göre sertifikasyonunu ve izlenebilirliğini sürdürmektedir.

Lütfen bu bilgileri laboratuvar personelinizle paylaşın ve bu bildirim laboratuvar dokümantasyonunuzun parçası olarak saklayın.

Bu ürünle ilgili sorularınız varsa, lütfen yerel Beckman Coulter Temsilciniz ile temas kurun veya yerel iletişim bilgilerinin listesi için aşağıdaki bağlantıyı kullanın:

<https://www.beckmancoulter.com/en/support/contact-us>

Beckman Coulter ürün ve hizmetlerine gösterdiğiniz sürekli destek için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,



Angela Keogh
Kıdemli Yönetici, Global Ürün Yönetimi

© 2019 Beckman Coulter Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu belgede belirtilen Beckman Coulter, stilize logo ve Beckman Coulter ürün ve hizmet markaları, Beckman Coulter, Inc. firmasının ABD'de ve diğer ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.